

Touch Bionics

Touch Bionics propose des solutions prothétiques innovantes reconnues internationalement pour les bénéfices qu'elles confèrent aux personnes atteintes d'une ablation du membre supérieur. Nos prothèses de haute technologie s'adaptent à tous les niveaux d'amputation et tous les besoins : solutions myoélectriques pour les ablations complètes ou partielles de la main, ou encore prothèses esthétiques en silicone reproduisant fidèlement l'apparence du membre ablaté. Notre engagement auprès de nos patients et clients est total : formation, suivi clinique personnalisé, tout est mis en œuvre pour leur permettre de tirer le meilleur des produits qu'ils ont choisi.

Amérique du Nord +1 855 MY iLIMB (694 5462), customersupportus@touchbionics.com

Allemagne +49 6227 381 174 / 178, infos@touchbionics.de

France: 0805 110478, info@touchbionics.fr

International: +44 1506 438 556, info@touchbionics.com

© Copyright 2015. Touch Bionics Inc and Touch Bionics Limited. All rights reserved.



Guide de démarrage rapide i-limb™



Guide de démarrage rapide i-limb™

Téléchargement du logiciel biosim et configuration minimale système requise

Pour télécharger le logiciel biosim, consultez le site : www.touchbionics.com/biosimdownload

- Systèmes d'exploitation supportés : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, ou Mac OS X Lion (versions 10.7 et supérieures)
- Microsoft .NET Framework v3.5
- Port USB pour le connecteur Bluetooth® (fourni sur demande)
- Droits d'administrateur pour installer le logiciel et le connecteur Bluetooth®

Téléchargement de l'application mobile "my i-limb™"

L'application mobile my i-limb™ est disponible sur l'App store d'Apple® et est compatible avec les terminaux suivants : iPhone® (générations

4s et supérieures), iPad® (générations 4 et supérieures), iPad® mini, iPod® (génération 5 et supérieures)

Manuels d'utilisation des produits

Pour vous procurer la dernière version du manuel d'utilisation de votre prothèse, consultez le site : www.touchbionics.fr, rubrique

téléchargements. Une version imprimée du manuel d'utilisation de votre prothèse peut vous être fournie sur simple demande à notre service

clients

Charge de la batterie

Pour des questions de compatibilité et d'optimisation des performances de votre prothèse, utilisez UNIQUEMENT le chargeur Touch Bionics.

fourni avec votre prothèse.



Pour charger votre prothèse, il est nécessaire de l'éteindre et de la déchausser.



La batterie doit être remplacée chaque année pour de meilleures performances de votre prothèse.



Les utilisateurs des batteries interchangeables Power Pack doivent consulter les instructions relatives à leur charge dans le manuel d'utilisation de ce système.

Avertissements et précautions d'emploi

Veillez prendre connaissance des avertissements et informations énoncés ci-dessous avant d'utiliser votre prothèse i-limb™.

Leur non-respect peut conduire à un risque de dysfonctionnement de l'appareil ou même un danger potentiel pour votre santé. En outre la garantie peut être annulée en cas de non-respect des éléments sous-listés.

Ne pas utiliser sans un gant de recouvrement approprié

Ne pas utiliser sous l'eau

Ne pas utiliser pour actionner des machines-outils lourdes et industrielles

Ne pas utiliser de machines incluant des pièces mobiles susceptibles de provoquer des blessures ou des dégâts corporels

Les utilisateurs doivent se conformer à la réglementation locale en matière de conduite automobile, transport aérien et tout autre moyen de locomotion motorisé (se référer au manuel d'utilisation de votre prothèse pour des informations détaillées concernant la conduite automobile : recommandations Touch Bionics + réglementation en vigueur)

Ne pas exercer d'activités extrêmes qui pourraient blesser une main naturelle (exemple : escalade)

Ne pas exposer à une humidité excessive, aux liquides de toute sorte, à la poussière, aux vibrations ou aux chocs

Ne pas exposer aux températures extrêmes

Ne pas exposer aux flammes ou toute source de chaleur extrême

Ne pas utiliser ou exposer à proximité de produits explosifs

Ne pas démonter les composants de votre prothèse, ni les modifier de quelque manière que ce soit

La maintenance, les réparations et les mises à jour de votre prothèse

ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés Touch Bionics ou certifiés par Touch Bionics

Ne pas utiliser votre prothèse avec un gant de recouvrement endommagé

Les gants de recouvrement endommagés doivent être remplacés ou réparés par un technicien qualifié Touch Bionics certifié par Touch Bionics

Seuls les accessoires et les outils approuvés par Touch Bionics peuvent être utilisés avec les dispositifs i-limb™

Pour les utilisateurs d'un poignet multi-flex™, celui-ci doit obligatoirement être verrouillé lors du maniement d'objets

Consultez le site www.touchbionics.fr pour plus d'informations concernant les précautions d'emploi et les règles de bonne utilisation de votre prothèse i-limb™.