



Guide d'utilisation et
d'entretien des gants
de recouvrement


touch
bionics



Ce symbol apparait tout au long du manuel pour signaler les informations de première importance

Contenu

- 1 Avertissements
- 2 Enfiler les gants i-limb skin active et i-limb skin active TS
- 3 Retirer les gants i-limb skin active et i-limb skin active TS
- 5 Enfiler les gants i-limb skin natural et i-limb skin match
- 10 Retirer les gants i-limb skin natural et i-limb skin match
- 11 Conseils pour le port et l'entretien



Avertissements

- Votre prothèse doit être exclusivement utilisée avec un gant homologué par Touch Bionics sous peine d'annulation de la garantie.
- N'enfilez jamais plus d'un gant sur la prothèse
- Vérifiez toujours la taille et le côté (gauche ou droit) avant d'utiliser un gant.
- Vérifiez que le gant est correctement positionné
- Utilisez toujours la solution IPA comme indiqué

Enfiler les gants i-limb skin active et i-limb skin active TS



Les 4 doigts longs doivent être totalement ouvert et le pouce fermé, avec un espace de 15 mm entre le pouce et l'index. La main doit être mise hors tension pour s'assurer que cette position est maintenue. Pour la prothèse **i-limb ultra revolution**, vous pouvez sélectionner l'icône "enfiler ou retirer" dans l'application my i-limb. En sélectionnant cette touche, la main se positionne automatiquement dans la bonne position.



Alignez le gant de recouvrement i-limb skin active (TS) avec les doigts et tirez-le vers le bas pour recouvrir les doigts. Puis tirez délicatement vers le haut et par-dessus le pouce, en prenant soin de ne pas exercer de pression excessive sur le pouce.

Tirez le gant de recouvrement i-limb skin active (TS) par-dessus la main, jusqu'au poignet



Remuez chacun des doigts du gant i-limb skin active jusqu'à ce qu'ils soient entièrement ajustés.

Retirer les gants i-limb skin active et i-limb skin active TS



Le positionnement correct de la main est le même que pour enfiler le gant. Référez-vous à la partie « enfiler le gant » ci-dessus.



Tirez délicatement sur le gant de recouvrement au niveau du poignet et passez le par-dessus le pouce en prenant soin de ne pas exercer de pression excessive sur le pouce.



Tirez délicatement l'extrémité de chacun des doigts du gant vers le haut pour le retirer de la prothèse.

Enfiler les gants i-limb skin natural et i-limb skin match



Pour enfiler le gant de recouvrement, utiliser un spray de type IPA (alcool isopropylique) communément appelé alcool à friction.

La plupart des pharmacies sont en mesure de fournir un tel spray.



Les 4 doigts longs doivent être totalement ouvert et le pouce fermé, avec un espace de 15 mm entre le pouce et l'index. La main doit être mise hors tension pour s'assurer que cette position est maintenue. Pour la prothèse i-limb ultra revolution, vous pouvez sélectionner l'icône "enfiler ou retirer" dans l'application my i-limb. En sélectionnant cette touche, la main se positionne directement dans la bonne position.



Pulvérisez généreusement la face externe du gant avec le spray




Enroulez le gant de recouvrement sur lui-même, du poignet jusqu'aux doigts, jusqu'à ce que les trous des doigts soient visibles.



Assurez-vous que les orifices soient clairement dégagés tout du long, sans amas de matériau. Pour cela, utilisez votre doigt et sondez l'orifice jusqu'au bout du doigt retourné.



Insérez votre doigt dans le trou correspondant au pouce jusqu'à toucher le bout et faites le ressortir en créant un phénomène de succion et en tirant rapidement vers l'extérieur.

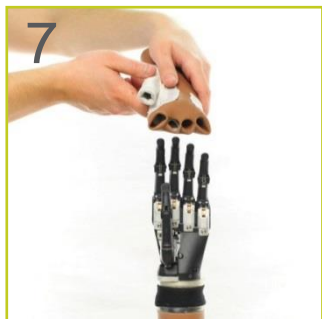

Alignez les trous des doigts du gant avec les doigts de la prothèse. Assurez-vous que le pouce soit dans la bonne position.



Placez le gant au niveau du bout des doigts de la prothèse et pulvérissez à nouveau généreusement avec le spray IPA. Attention à ne pas pulvériser la face interne du gant.



9
Faites glisser le gant sur les 4 doigts de la main et tirez vers le bas jusqu'à atteindre le pouce. Placez le trou du pouce au niveau de l'extrémité du pouce côté prothèse.



10
Continuez à dérouler le gant vers le bas. Faites attention à ce que le pouce reste bien dans l'alignement des doigts.



11
Une fois le gant entièrement enfilé, vérifiez qu'il n'y a pas de pli ou de chevauchement. Assurez-vous que le bout de chaque doigt du gant est bien en place au niveau du bout des doigts de la main.



12
Vérifiez que le pouce soit correctement placé en tirant sur l'extrémité du gant et en le faisant tourner dans un sens puis dans l'autre. Cela vous permettra de vérifier que la doublure est bien en place et qu'il n'y a pas de pli au niveau du bout du pouce.



Retirez l'excédent de produit IPA à l'aide d'une serviette. Vérifiez la fonctionnalité de la main en l'ouvrant et en la fermant complètement pour vous assurer qu'aucun mouvement n'est limité.

Note: Lorsque vous utilisez les gants de recouvrement i-limb skin natural ou i-limb skin match, les réglages doivent être réalisés à l'aide du logiciel biosim pour s'assurer du fonctionnement optimal des doigts.

Contactez votre orthoprothésiste ou Touch Bionics pour les questions concernant ces réglages.

Note: Une vidéo explicative sur la manière d'enfiler un gant i-limb skin natural est disponible à l'adresse suivante :
www.touchbionics.com/downloads/general-videos

Retirer les gants i-limb skin natural et i-limb skin match



Les 4 doigts longs doivent être totalement ouverts et le pouce fermé, avec un espace de 15 mm entre le pouce et l'index. La main doit être mise hors tension pour s'assurer que cette position est maintenue. Pour la prothèse i-limb ultra revolution, vous pouvez sélectionner l'icône "enfiler ou retirer" dans l'application my i-limb. En sélectionnant cette touche, la main se positionne automatiquement dans la bonne position.



Tirez les extrémités du gant vers le haut, pour chacun des doigts et le pouce, afin de donner un peu de laxité au gant par rapport à la prothèse.



Tirer le gant vers le haut en prenant soin de ne pas exercer trop de pression sur le pouce



Tirer jusqu'à ce que le gant glisse facilement sur la base des doigts et puisse être retiré.

Conseils pour le port et l'entretien

Le soin apporté aux gants de recouvrement est très important pour leur conservation sur le long terme. Quelques exemples pour le port et l'entretien sont indiqués ci-après.

Nettoyage du gant de recouvrement

Nettoyez régulièrement l'extérieur du gant de recouvrement à l'eau chaude et au savon. L'utilisation d'un savon approprié est très importante - des savons doux pour vaisselle sont recommandés.

ATTENTION: Certains savons contiennent des additifs tels que de l'huile, du parfum, de la lotion pour les mains, de la glycérine ou de l'aloé, et doivent être évités. Nettoyez le gant de recouvrement avec de l'alcool dénaturé de qualité médicale une fois par semaine, pour le désinfecter.

Précautions de nettoyage

Les huiles et les substances huileuses ne risquent pas d'endommager le gant de recouvrement. Toutefois, les substances huileuses attirent et créent une adhérence des salissures, de la crasse et d'autres produits chimiques qui peuvent finir par endommager le gant de recouvrement s'il n'est pas lavé et nettoyé régulièrement, comme décrit ci-dessus. De nombreux produits pour les cheveux et le corps contiennent de l'huile et ne doivent être utilisés que lorsque la prothèse n'est pas portée. L'exposition aux huiles et aux substances huileuses peut rendre la prothèse luisante. N'utilisez pas de nettoyeurs pour éliminer l'aspect luisant, car ils sont abrasifs et donnent un aspect terni au gant de recouvrement.

La transpiration du corps contient des huiles qui peuvent s'accumuler et endommager la prothèse si elles ne sont pas éliminées par un nettoyage approprié.

Le non-respect de ces précautions d'entretien peut entraîner une annulation de garantie.

Soyez vigilants aux produits que vous utilisez

Bien que le gant de recouvrement soit fait en matériau durable, il peut se tacher avec le temps. Parmi les substances à éviter se trouvent le Woolite® bleu, les marqueurs indélébiles, certains stylos et certaines encres (l'encre des journaux ne tache pas), les blue jeans et les tissus non lavés, l'eau de Javel, l'exposition chronique à la fumée de cigares et de cigarettes, le papier carbone et le papier autocopiant sans carbone ; d'autres produits peuvent aussi tacher votre gant de recouvrement, la liste fournit ci-dessus n'est pas exhaustive.

Taches

Si le gant de recouvrement est taché, un lavage immédiat à l'eau chaude et au savon ordinaire, puis un nettoyage à l'alcool sont le plus susceptibles d'éliminer les taches.

Précautions contre les déchirures

Pour éviter les déchirures, Soyez vigilants lors de l'utilisation d'objets pointus et évitez les chocs contre des rebords saillants. Evitez également les activités pouvant exposer le gant à des frictions ou des tensions importantes comme pousser la prothèse contre un objet lourd.

N'essayez pas de réparer votre gant i-limb skin

Si le gant de recouvrement est endommagé, n'essayez pas de le réparer. Contactez votre prothésiste. Le fait de couper, de coller ou de dégrader votre gant de recouvrement peut le rendre irréparable et entraînera l'annulation de la garantie.

Accès à la batterie ou à l'interrupteur

Si vous avez besoin d'accéder au port de charge ou à l'interrupteur, pulvérisez l'extérieur avec de l'alcool dénaturé médical pour le rouler facilement sur lui-même ; ceci permet de retirer partiellement le gant sans risque de dégâts liés à la friction exercée si l'alcool dénaturé n'est pas utilisé.

Ongles

Les ongles des gants i-limb skin natural et i-limb skin match sont en silicone ou en vinyle/acrylique. Dans le second cas, il est possible de les vernir. Utilisez un dissolvant doux sans acétone pour retirer le vernis. Les ongles en silicone ne peuvent et ne doivent jamais être vernis. Enfin, la pose de faux-ongles n'est pas possible quel que soit le type d'ongles présent sur le gant de recouvrement ; poser des faux-ongles entraîne l'annulation immédiate de la garantie du gant.

Gants et bijoux

Si vous souhaitez porter des gants, les gants de soie ou de tissu souple s'enfilent et se retirent facilement de la main.

Si vous souhaitez porter des bijoux, ils doivent être en métal de haute qualité tel que l'argent ou l'or.

Les bracelets en cuir ou en tissu ne déteignent pas et peuvent être portés sans risque.

Garantie

La garantie constructeur pour les gants i-limb skin active, i-limb skin active TS, i-limb skin natural et i-limb skin match a une durée de 3 mois . Elle est applicable à condition que l'entretien approprié décrit dans les pages précédentes ait été apporté aux gants de recouvrement.



Votre prothèse doit être exclusivement utilisée avec un gant homologué par Touch Bionics sous peine d'annulation de la garantie du dispositif.



Clientèle française
Tel : 0805 110478

Email: info@touchbionics.fr

Pour plus d'information sur les produits
et services Touch Bionics, prière de
consulter le site www.touchbionics.fr